



Onderhoud uw gehoorbescherming goed. Stof, rook en oorsmeer kunnen uw gehoorbeschermers verstopen. Het resultaat: vervormde geluidsproductie- of helemaal geen geluidsproductie.

Zodra het kanaal van uw gehoorbeschermers dicht zit met oorsmeer, dan heft u de werking van het filter op en dan werken uw gehoorbeschermers niet meer naar behoren. Daarnaast kunnen hygiëneproducten het risico op oorinfecties aanzienlijk verlagen.

Wat heeft u nodig?:

- Reinigingstablet
- Beker
- Blasbalgje
- Schone droge doek

Ga stap voor stap te werk:

1. Vul de reinigingsbeker voor met 2/3 water
2. Plaats een reinigingstablet in de reinigingsbeker
3. Plaats de gehoorbeschermers in het zeefje van de reinigingsbeker
4. Reinigingsduur minimaal 15 minuten en maximaal 8 uur
5. Verwijder het zeefje met gehoorbeschermers uit de reinigingsbeker en spoel af onder stromend water
6. Verwijder de gehoorbeschermers uit het zeefje en droog ze met een de doek
7. Blaas verschillende keren met het blaasbalgje het resterende vocht uit de geluidgang

