



Er zijn twee soorten hoortoestellen die achter het oor worden gedragen. Luidspreker in het oor is het toestel waar u voor gekozen heeft. Aan het eind van de luidspreker, onder de tip/maatdopje, zit een klein oorsmeerfilter. Deze oorsmeerfilter voorkomt dat de luidspreker beschadigd raakt door stof of vuil. Als de tip of het oorsmeerfilter verstopt zit, hoort u het geluid niet of zachter doorkomen. Belangrijk is dus om deze tip en filter te vervangen indien deze verstopt zitten.

Wat heeft u nodig:

- Tissues of droge zachte doek
- Filters
- Cerumen pen/borsteltje

Ga stap voor stap te werk:

1. Pak de cerumen pen/borsteltje en maak de buitenkant/microfoonplaat schoon van het hoortoestel
2. Maak met dit borsteltje ook het maatdopje/tip schoon
3. Maak met de cerumen lus de gaatjes schoon door het smeervuil uit de gaatjes te wippen
4. Indien u constateert dat het vuil niet uit de filter gaat, moet u het filter vervangen

Vervangen filter:

1. Indien er een tip op het toestel zit, zal de tip eraf gehaald moeten worden
 2. Er zit een wit filtertje op de luidspreker, deze gaat u vervangen
 3. Pak het filter doosje erbij
 4. Trek een zwart staafje uit de blister, aan de onderkant zit nu een schoon wit filter
 5. Aan de andere kant ziet u een zwart puntje
 6. Druk dit zwarte puntje in het vieze filter van het hoortoestel/ de luidspreker
 7. Trek het vieze filter uit het toestel
 8. Draai het zwarte staafje om en druk de nieuwe filter in de luidspreker
 9. Druk de tip weer op de luidspreker
- Let op dat deze goed aansluit, dus ver genoeg op de luidspreker drukken!

